

7889-01



3M™ Attest™ Indicateurs biologiques de stérilisation à la vapeur, PQ/100

3M Attest - indicateur biologique pour la stérilisation à la vapeur. Ces indicateurs biologiques autonomes, destinés aux cycles de stérilisation à la vapeur à 250 °F/121 °C par gravité et à 270 °F/132 °C sous vide, se composent d'une bande de spores de *Geobacillus stearothermophilus* ; une ampoule en verre scellée contenant un milieu de culture et un système indicateur de pH au violet de bromocrésol ; un bouchon brun avec des orifices pour la pénétration de l'agent de stérilisation et un filtre hydrophobe servant de barrière bactérienne, ainsi qu'un indicateur chimique sur l'étiquette qui passe du rose au brun lors du traitement. Après stérilisation, le flacon est « écrasé » afin de mélanger le milieu de culture (ou de croissance) avec la bande de spores traitée. L'indicateur biologique est incubé pendant 48 heures pour permettre une lecture visuelle du changement de couleur. Un changement de couleur vers le jaune indique la présence de spores survivantes et un résultat positif.



661 Route 3, local C
Plattsburgh, New York 12901
SANS FRAIS 1.800.932.1039
FAX 1.518.563.7331
www.medisca.com

Les informations ci-dessus constituent une transcription fidèle des renseignements fournis à MEDISCA® à partir de la fiche technique et/ou du certificat de conformité fournis par le fabricant/fournisseur.

COMPOUNDING QUALITY WITH SERVICE™