

8790-01



SealSafe - bouchon de fermeture pour bouteille, en plastique, couleur Naturelle, 24 mm, PQ/100 (ANDWIN SCIENTIFIC)

Remarque : Bouteille non fournie.

Les bouchons brevetés SealSafe - bouchons de fermeture pour bouteille permettent de prélever avec une seringue orale la quantité exacte nécessaire tout en réduisant les risques de déversement, d'évaporation et de contamination. Ils s'adaptent parfaitement à la plupart des bouteilles de leur gamme de tailles, ce qui permet de remplacer les bouchons de sécurité enfants (C/R) d'origine par-dessus. Les bouchons SealSafe sont dotés d'anneaux d'étanchéité souples qui leur permettent de s'adapter à différentes tailles de flacons. Pour les utiliser, il suffit d'insérer l'embout d'une seringue orale dans un bouchon SealSafe, de prélever la dose mesurée, puis de retirer l'embout. Le bouchon se referme rapidement, assurant une étanchéité sûre et propre.

Caractéristiques :

-  Optimiser la précision de l'administration des médicaments
-  Éviter l'évaporation, les déversements et la contamination
-  Les bouchons d'origine à sécurité enfant et les bouchons standard s'adaptent aux adaptateurs
-  Les repères de dosage faciles à lire sur les seringues ne pénètrent jamais dans le flacon
-  Évitez le gaspillage en utilisant toujours le médicament jusqu'à la dernière goutte
-  Limiter tout accès accidentel, même lorsque les capuchons C/R sont retirés

Les informations ci-dessus constituent une transcription fidèle des renseignements fournis à MEDISCA® à partir de la fiche technique et/ou du certificat de conformité fournis par le fabricant/fournisseur.

Mode d'emploi :



1. Select a bottle with a compatible neck size.



2. Remove the screw-cap.



3. Press a SealSafe™ Adapter into the neck of the bottle.



4. Insert the tip of an oral syringe into the seal, turn the bottle upside-down and draw a desired dosage.



5. Turn the bottle right-side-up and remove the syringe tip. The SealSafe™ Adapter reseals after the tip is removed. Replace the cap onto the bottle.

 SealSafe™ Adapters should be tested for use with specific containers, liquids and oral syringe tips to confirm fit and compatibility and to ensure optimal performance.



661 Route 3, local C
Plattsburgh, New York 12901
SANS FRAIS 1.800.932.1039
FAX 1.518.563.7331
www.medisca.com

Les informations ci-dessus constituent une transcription fidèle des renseignements fournis à MEDISCA® à partir de la fiche technique et/ou du certificat de conformité fournis par le fabricant/fournisseur.

COMPOUNDING QUALITY WITH SERVICE™